


APIS Technologies

i·STOP™

ИМПЛАНТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СТРЕССОВОГО
НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У ЖЕНЩИН



Что такое слинговая операция?

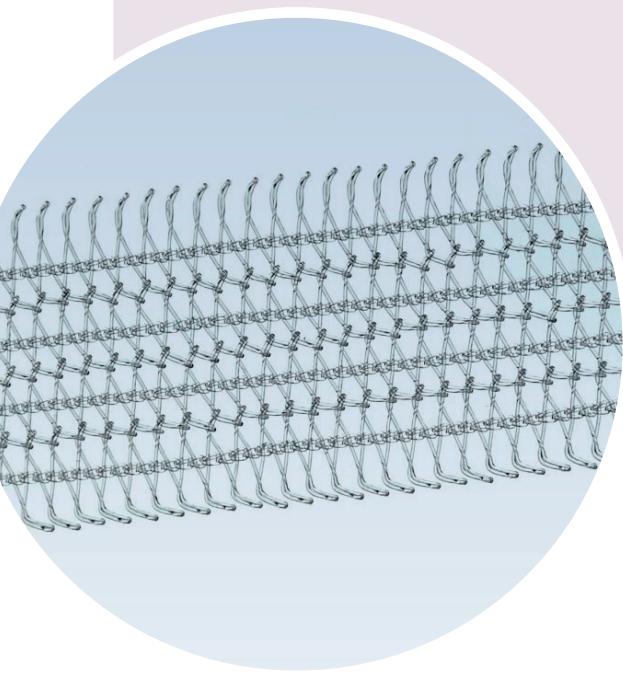

Плетение слинга i-STOP™ выполнено таким образом, что края петли остаются максимально атравматичными, а крупные ячейки сетки (макропоры) способствуют более быстрой и качественной пролиферации соединительной ткани, сокращая время, требуемое для фиксации слинга в тканях пациента.

Великолепные результаты:

95%

коэффициент коррекции стрессовой инконтиненции после процедуры

91.7%

пациенток удовлетворены
результатами лечения

Melanie Crites-Bachert, Bradley Loomis. I-Stop® for Treatment of Stress Urinary Incontinence: High Satisfaction Rate and Low Morbidity. International Journal of Clinical Urology. Vol. 5, No. 2, 2021, pp. 58–63. doi: 10.11648/j.ijcu.20210502.11

Слинговые, или петлевые, операции — это группа оперативных вмешательств, заключающихся в укреплении среднего участка мочеиспускательного канала поддерживающей петлей (слингом).

К настоящему времени технология выполнения таких операций хорошо отработана, а на рынке представлены слинги разных производителей, включая российских.

Сегодня мы представляем вашему вниманию слинги i-STOP™ производства швейцарской компании APIS Technologies® и приглашаем ознакомиться с преимуществами этих имплантов, вот уже более 20 лет пользующихся заслуженным уважением европейских врачей-урологов и их пациентов.

Шесть причин, чтобы выбрать i-STOP™

● Низкая эластичность

Слинг практически не растягивается со временем, сохранив поддержку среднего участка уретры, что обеспечивает длительный эффект от лечения

● Атравматичные края

Установка слинга не приведет к излишней травматизации тканей пациента, а значит, заживление после имплантации происходит значительно быстрее

● 100% моноволоконный полипропилен I типа

Идеальный материал по соображениям прочности, биосовместимости и гипоаллергенным свойствам.

● Макропоры

Широкие ячейки сетки слинга (макропоры) облегчают пролиферацию клеток соединительной ткани и сокращают время фиксации слинга на месте после имплантации

● Легкий

Плотность сетки всего 60 граммов/м². Это самые легкие слинги на рынке на сегодняшний день

● Сделано в Швейцарии

Знаменитое на весь мир швейцарское качество теперь доступно и в деле лечения стрессовой инконтиненции! APIS Technologies® предлагает миру свои продукты уже более 20 лет

Оперативные доступы при слинговых операциях



Трансобтураторный доступ

Петля слинга проводится через запирательные отверстия таза либо антероградно (трансобтураторный доступ), либо ретроградно (ретрообтураторный доступ). Свободные концы петли фиксируются в мягких тканях лобковой области.



Ретропубикальный доступ

Петля слинга проводится за лонными костями и выводится из полости малого таза вверх на брюшную стенку. Свободные концы слинга при этом фиксируются в мягких тканях нижней части передней брюшной стенки.

Варианты исполнения наборов i-STOP™



i-STOP™ IS-5

- Эндопротез сетчатый
длина 465 мм (1 шт)
- Игла спиралевидная
для трансобтураторного доступа,
с фиксированной ручкой (2 шт)
- Игла изогнутая
для ретропубикального доступа (2 шт)
- Игла Эммета
для трансобтураторного доступа (2 шт)
- Ручка для иглы (2шт)



i-STOP™ IS-HELICO-01

- Эндопротез сетчатый
длина 465 мм (1 шт)
- Игла спиралевидная
для трансобтураторного доступа,
с фиксированной ручкой (2 шт)



i-STOP™ IS-M-1

- Эндопротез сетчатый
длина 410 мм (1 шт)
- Игла изогнутая
для ретропубикального доступа,
с фиксированной ручкой (1 шт)

Все варианты наборов включают инструкцию по применению и набор стикеров, предназначенных для отслеживания импланта



СЭЙДЖ
ОСНОВАНО В 1995

Эксклюзивный импортёр APIS Technologies
в Российской Федерации

Центральный офис

121069 Москва
ул. Малая Никитская, д. 20/9, стр. 2
+7 (495) 234 3945, +7 (495) 234 3946
+7 (495) 690 2664, +7 (495) 690 2501
+7 (495) 690 2815
Факс: +7 (495) 234-39-47
E-mail: info@sagemed.ru

Урал

620137 Екатеринбург
ул. Мира, д. 8, офис 106
Телефон/факс: +7 (343) 286 1977
Телефон моб.: +7 (912) 607 9691
E-mail: pavlova@sagemed.ru

Сибирь

630001 Новосибирск,
ул. Кавалерийская, д. 2, офис 12
Телефон/факс: +7 (383) 311 0073
Телефон моб.: +7 (983) 321 4700
E-mail: sage-sibir@sagemed.ru

Южный регион

350063 Краснодар
Кубанская наб., д. 45, офис 501
Телефон: +7 (861) 238 6112
Телефон моб.: +7 (989) 127 0243
E-mail: sage-kuban@sagemed.ru

Поволжье

603005 Нижний Новгород
ул. Мануфактурная, 14, оф. 204
Телефон/факс: +7 (831) 411 9456
Телефон моб.: +7 (989) 127 0243
E-mail: sage-volga@sagemed.ru

Северо-запад

191119 Санкт-Петербург
ул. Социалистическая, 14, лит. А, оф. 508
Телефон/факс: +7 (812) 607 5998
Телефон моб.: +7 (911) 923 4691
E-mail: sage-spb@sagemed.ru

Мы в интернете
WWW.sagemed.ru



© 2021 ЗАО «Сэйдж»

Представленные в брошюре продукты имеют противопоказания к использованию и должны применяться только по назначению и под контролем квалифицированного медицинского персонала.

Материалы, представленные в настоящей брошюре, верны на момент печати (август 2021), носят информативный характер и не являются руководством к клиническому применению описываемых продуктов. Для получения информации, касающейся непосредственно показаний, противопоказаний и непредвиденных побочных явлений, возникающих в связи с использованием описываемых продуктов, обратитесь к соответствующим инструкциям от производителя.

Все приведенные в настоящей брошюре зарегистрированные торговые знаки и товарные марки принадлежат их законным правообладателям.